



検査検診用ニトリル手袋 MD889C

NITRILE EXAM GLOVES

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN:70976000 届出番号:28B3X10035000001
食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号)

厚さ2.5milタイプ(約0.06mm)の
ニトリルゴム製ディスポーザブル手袋

加硫促進剤
フリー

アレルギー性接触皮膚炎の原因となる
加硫促進剤を使用していないため、
手肌にやさしい手袋です

伸縮性があり、やわらかく手にフィット

パウダーフリー・ラテックスフリー

内面処理により、はめやすい

食品衛生法適合



サイズが識別しやすいパッケージ



用途

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

仕様

材料名: ニトリルゴム(未滅菌)
カラー: パープル
厚さ: 2.5milタイプ(約0.06mm)
入数: 200枚
左右兼用
パウダーフリー
ラテックスフリー

手袋サイズ表

サイズ	全長	手のひらまわり
XS	24cm	15cm
S		17cm
M		19cm
L		21cm

※寸法表示は参考値で、着用時の寸法は伸縮により異なります。



検査検診用ニトリル手袋 MD889C 試験結果

試験方法	項目		結果
ASTM F 1671	血液由来病原体透過性		合格
EN16523-1	薬品 耐透過性	37% ホルムアルデヒド	>240分
		40% 水酸化ナトリウム	>480分
		30% 過酸化水素水溶液	>120分
ASTM D6978-05	抗がん剤 耐透過性	50.0mg/ml イホスファミド	>240分
		20.0mg/ml エトポシド	>240分
		10.0mg/ml カルボプラチン	>240分
		3.3mg/ml カルムスチン	11.3分
		20.0mg/ml シクロホスファミド	>240分
		1.0mg/ml シスプラチン	>240分
		10.0mg/ml ダカルバジン	>240分
		10.0mg/ml チオテパ	7.4分
		2.0mg/ml ドキソルビシン塩酸塩	>240分
		6.0mg/ml パクリタキセル	>240分
		50.0mg/ml フルオロウラシル	>240分
		0.5mg/ml マイトマイシンC	>240分
		2.0mg/ml ミトキサントロン	>240分
		25.0mg/ml メトトレキサート	>240分
		1.0mg/ml 硫酸ビンクリスチン	>240分

※上記の表は手袋試験片での試験結果であり、手袋としての性能を保証するものではありません。

品番	販売名	サイズ	手袋カラー	JANコード	ITFコード	梱包入数
MD889C	検査検診用ニトリル手袋 MD889C	XS	パープル	4901792044998	14901792044995	10函
		S		4901792045001	14901792045008	
		M		4901792045018	14901792045015	
		L		4901792045025	14901792045022	

【発売元】

ショーワグローブ株式会社

本 社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

www.showaglove.co.jp

お問合わせ先

0120-641245

[受付時間] 9:00~17:00 (土日祝日を除く)